

Lifeline **PRO** | **ECG**



Der schnelle und professionelle

LEBENSRETTER

Neu!

- Einfachste Bedienung • Medizinische Effektivität
- Führende Technologie • Vierfache Funktionalität
- Maximale Betriebssicherheit • Preisgekröntes Design



defibtech

Life-Saving Technology Within Reach

Lifeline **PRO** – Medizinischer Fortschritt



Superflaches,
preisgekröntes Design



Grosses Display – auch zur Anzeige der
Rettungsschritte

Allenspach Medical AG - Dornacherstrasse 5 - 4710 Balsthal - T: 062 386 60 60 - F: 062 386 60 69 - www.allenspachmedical.ch

defibtech

WWW.DEFIBTECH.CH

Allenspach Medical AG

Tel. 062 386 60 60 • info@allenspachmedical.ch • Fax 062 386 60 69

www.allenspachmedical.ch

CE
0197




tschritt, der sich sehen lassen kann.

Mit dem Lifeline Pro setzt Defibtech in puncto »einfachste Bedienung bei maximaler Funktionalität« weltweit neue Massstäbe: Denn es ist der einzige Defibrillator für professionelle Anwender, der vier Funktionen in einem Gerät vereint.



Manuelle Auslösung mit EKG-Display

Im manuellen Modus beurteilt der professionelle Helfer den EKG-Rhythmus des Patienten und legt das Energieniveau für den abzugebenden Schock fest. Die EKG-Amplitude ist dazu auf dem grossen, hell erleuchteten Farbdisplay des Lifeline PRO deutlich sichtbar. Zusätzlich werden die Herzfrequenz, die Einsatzzeit und die Anzahl der abgegebenen Schocks dargestellt. In diesem Modus übernimmt der Ersthelfer die Kontrolle über den Defibrillationsverlauf.

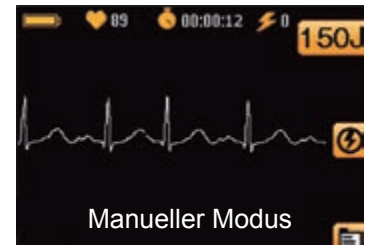

Automatische Analyse mit EKG-Display

Im automatisierten Modus beurteilt der Lifeline PRO den EKG-Rhythmus des Patienten und gibt – im Fall der Fälle – die Schocktaste zur Auslösung frei. Wird diese durch den Helfer gedrückt, gibt der Lifeline PRO einen biphasischen Schock mit 150 Joules und zeitgesteuerter Impedanzanpassung ab. Über das EKG auf dem Farbdisplay wird der Helfer jederzeit über den Herzrhythmus des Patienten informiert.




Ersthelfer AED-Videomodus

Der Lifeline PRO ist der weltweit einzige automatisierte externe Defibrillator (AED), der ein farbiges und interaktives Display besitzt, das den Ersthelfer Schritt für Schritt per Video durch die Massnahmen der Ersten Hilfe führt. Von der Vorbereitung des Patienten über die Befestigung der Elektroden bis zur Schockabgabe und den einzelnen Schritten der Herz-Lungen-Wiederbelebung, wahlweise mit und ohne Beatmung. Somit ermöglicht der Lifeline PRO selbst Laien, im Notfall die Schocktherapie korrekt durchzuführen.



Modus Patientenüberwachung

Im Patientenüberwachungsmodus kann das Display mittels 3-Kanal EKG-Kabel auch zur EKG-Überwachung eines Patienten genutzt werden. Er macht den Lifeline PRO besonders wertvoll für Anwender, wenn es um die Überwachung von Patienten geht, die nicht akut von einem Herz-Kreislauf-Stillstand betroffen sind.

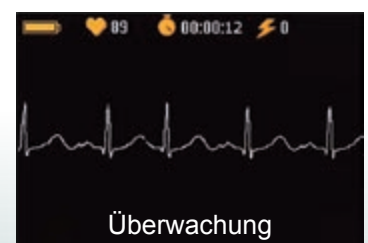

Die lebenswichtigen Eigenschaften



Führende Technologie

Der Lifeline PRO ist klinisch getestet und übertrifft die geltenden Richtlinien des European Resuscitation Council (ERC). Durch die biphasische Defibrillation mit nur 150 Joule wird der Herzmuskel geschont (AED Modus). Die Impulsform mit zeitgesteuerter Impedanzanpassung ermöglicht eine individuell auf den Patientenoberkörper abgestimmte Behandlung. Mit einer Ladezeit von unter vier Sekunden ist der Lifeline PRO so schnell einsatzbereit wie kein anderer Defibrillator.



Ergonomisches Smart Design

Das ergonomische Smartdesign ist gemäss neuesten Erkenntnissen der Gebrauchstauglichkeit bzw. Usability entwickelt worden. Es ermöglicht so jedem Anwender, den Lifeline PRO schnell und korrekt zu bedienen.



Langlebige Ausführung

Der langlebige Lifeline PRO ist so robust konstruiert, dass er einen Sturz aus 1,2 Meter ohne Schäden überlebt. Durch die schwallwasserfeste und staubdichte Verkapselung kann das Gerät auch in schwierigem Gelände bei Regen, Schnee und niedrigen Temperaturen eingesetzt werden. Er ist kompakt, tragbar und mit 1,4 kg ein echtes Leichtgewicht.



EKG-Dokumentation

Der Lifeline PRO besitzt einen internen Speicher, der bis zu 60 Minuten lang EKG-Daten aufzeichnet. Mittels SD-Speicherkarte (Schnittstelle) bzw. USB-Anschluss ist die Übertragung auf einen PC möglich. Mit dem Einlegen einer SD-Datenkarte kann die Aufzeichnungszeit auf bis zu 30 Stunden verlängert werden.



Einfache Software-Updates

Mittels einer SD-Speicherkarte (Schnittstelle) bzw. einem USB-Anschluss lässt sich der Defibrillator stets auf den neuesten technischen Stand hinsichtlich der Behandlung von Herzstillstand-Patienten bringen.



n des Lifeline **PRO** im Detail:



Versagt nie: Der betriebssichere Lifeline PRO

Was nützt Ihnen das beste Gerät, wenn es im entscheidenden Moment versagt? Der Lifeline PRO schliesst jedes Betriebs- bzw. Funktionsrisiko aus: Er führt täglich zahlreiche Selbsttests durch. Eine blinkende, einfach sichtbare Leuchtanzeige signalisiert, dass alles in Ordnung ist. Für detaillierte Informationen zur Betriebsbereitschaft genügt ein Knopfdruck und der aktuelle Gerätestatus, sowie die Batterie-, Elektroden- und Software-Kenndaten werden sichtbar. Alles, ohne den Lifeline PRO richtig einschalten zu müssen.



Überwachung der Verbrauchsmaterialien

Der Lifeline PRO ist weltweit der einzige Defibrillator, der alle vorhandenen Verbrauchsmaterialien überwacht. Sollte die Batterie oder die Elektroden das Ablaufdatum überschritten haben, zeigt das Gerät diese Risikofaktoren durch ein visuelles und akustisches Signal an. Gleiches gilt auch für den Fall, dass bereits benutzte Elektroden am Gerät eingesteckt werden.



Einfache Wartung

Der Lifeline PRO hat das Thema Wartung revolutioniert: Bei einer Fehlermeldung erscheint ein Symbol auf dem Display, das Ihnen bei Betätigung die Fehlerbehebung auf dem Display per Video demonstriert.

Registrieren Sie sich noch heute mit Ihrem Gerät in unserer AED Verwaltungsdatenbank auf www.defibtech.ch und profitieren Sie als Kunde von vielen Dienstleistungen und Infos rund um Ihr AED-Gerät.



Praktische Tragtasche



Patentiertes Elektrodenfach auf der Rückseite

Der Lifeline Pro hat über seine einzigartige Multifunktionalität hinaus weitere nützliche Vorteile: Er ist robust konstruiert, langlebig und einfach zu warten. Und sein formschönes und anwenderfreundliches Design ist preisgekrönt. Medizinischer Fortschritt, der sich sehen lassen kann!


Lifeline **ECG** – Der AED mit Rhythmus.



Zusätzlich zu den Funktionen des Lifeline VIEW, zeigt der **Lifeline ECG** während der automatischen Analyse ein EKG-Display an.

Zudem kann dieser AED mittels 3-Kanal EKG-Kabel auch zur EKG-Überwachung eines Patienten genutzt werden:

- **EKG**
- **Herzfrequenz**
- **Anzahl abgegebener Schocks**
- **bereits vergangene Rettungszeit**

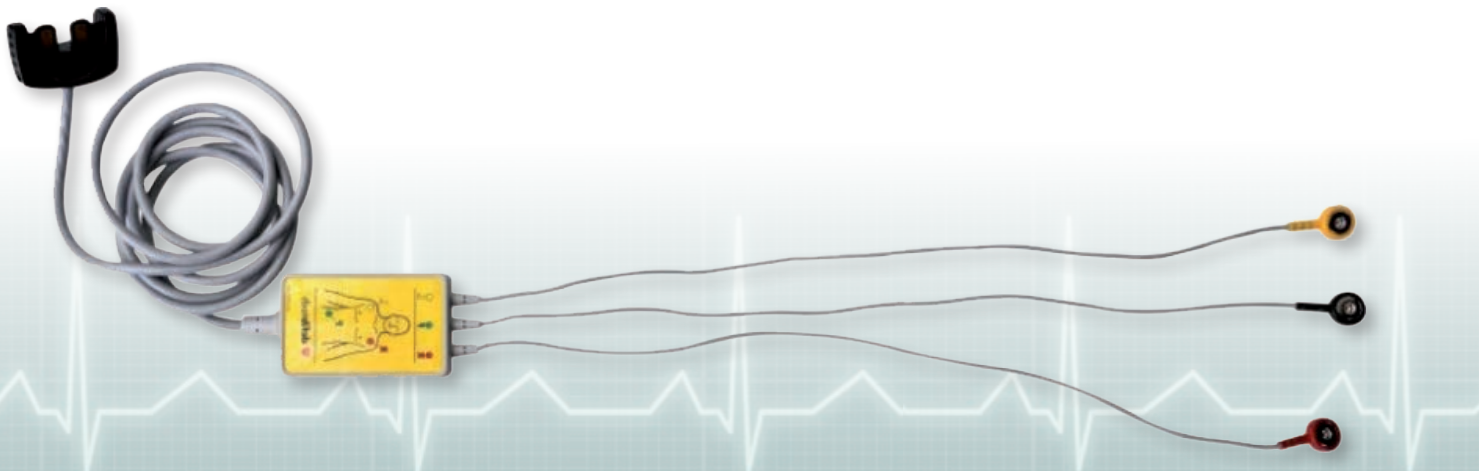

Lifeline PRO / ECG - Technische Spezifikationen*

Betriebsarten

Manueller Modus (nur Lifeline PRO)

Anzeige EKG Daten und Ereignis Information mit Energieauswahl von 25-200 Joule, Bedienung für Laden, Schockabgabe und Entladen.

AED Modus

Hochauflösendes Display (Animierte Anleitung und HLW Unterstützung) bzw. EKG Bildschirm

EKG Modus

Anzeige EKG Daten und Ereignis Information (mit 3-Kanal Kabel)

Defibrillator

Typ

Halbautomatisierter externer Defibrillator

Bedienelemente

Beleuchteter Ein-/Ausschalter
Beleuchtete Schocktaste

Modell

DDU-2400 / DDU-2450 Serie

Bildschirm

Hochauflösender
LCD Farbbildschirm

Impulsform

Biphasisch, exponentiell
(Impedanzangepasst)

Video Animation

Video mit bewegten Bildern
Textanweisungen

Energie AED Modus

Erwachsener: 150 Joules
Kinder: 50 Joules
(bei 50 Ohm Patientenimpedanz)

HLW Unterstützung

Visuelle und akustische
Bei Bedarf Video Hilfe

Energie Manueller Modus

Erwachsener: Wählbar
zwischen 25-200 Joules
Kinder: Wählbar zwischen
25-100 Joules

Sprachansagen

Umfangreiche Sprachansagen
führen den Anwender durch den
Betrieb des Gerätes

Ladedauer (neu bei 25°C)

Kleiner 4 Sekunden
Manueller Modus: Kleiner
9 Sekunden bei 150 Joules

Rescue Protokoll

ERC 2010
Unterstützt Protokoll-Updates
durch den Anwender
(passwortgeschützt)

Patienten-Analyse-System

Patienten-Analyse

Automatische Bewertung der
Patientenimpedanz für richtigen
Elektrodenkontakt. Überwacht
Signalqualität und analysiert EKG
bzgl. schockbarem Rhythmus

Sensitivität/Spezifität (Lifeline PRO)

Übertrifft Vorgaben AAMI-DF-39
und AHA Empfehlungen

Sensitivität/Spezifität (Lifeline ECG)

Übertrifft Vorgaben AAMI-DF-80
und AHA Empfehlungen

Batteriepack

Modell DBP-2003

Typ

Lithium Mangandioxid
Recyclebar
nicht wiederaufladbar

Energie

12V, 2800 mAh

Kapazität (Neu bei 25 °C)

125 Schocks oder 8 Stunden
Dauerbetrieb

Anzeige niedrige Batterieenergie

Visuell, akustisch

Standby-Zeit

4 Jahre (typisch)

Abmessungen

Grösse

18,5 x 24 x 5,8 cm

Gewicht

1,4 kg (inkl. Batterie)

Selbstüberwachung

Automatisch

Tägliche, wöchentliche und
monatliche Selbsttests (STK-
befreit)

Batterieeinlage

System-Integritätstest nach
Batterieeinlage

Manuell

Batterie- und Gerätetest kann
durch den Anwender nach Bedarf
ausgelöst werden

Status-Anzeige

Visuelle und akustische Anzeige
des Gerätestatus

Elektroden

Täglicher Test zu angeschl.
Elektroden

Status-Bildschirm

Geräte Selbsttestergebnisse
Elektroden und Batterie (Status
und Ablaufdatum)

Umgebungsbedingungen

Temperatur

Betrieb und Standby
0 bis 50 °C

Stossfestigkeit

per MIL-STD-810F 516.5
Prozedur 4 (1,2 Meter Fall, jede
Ecke, Seite, Fläche im Standby-
Modus)

Relative Feuchte

5-95% (nicht kondensierend)

Schutzklasse

IEC60529 Klasse IP55
Schwallwasser- und Staubschutz

Höhe

-150 bis 4500 m per MIL-STD-
810F 500.4 Prozedur 2

ESD (Lifeline PRO)

EN 61000-4-2:1998 (offen bis zu
8kV, Direktkontakt bis zu 6 kV)

Vibration

Am Boden per MIL-STD-810F
514.5 Kategorie 20

ESD (Lifeline ECG)

IEC 60601-4-2 (offen bis zu
15kV, Direktkontakt bis zu 8kV)

Helikopter

(RTCA/DO-160D, Sektion 8.8.2,
Kat. R, Zone 2, Kurve G)

EMC Emmission

CISPR 11 Gruppe 1 Level B und
FCC Teil 15

Flugzeug

(RTCA/DO-160D, Sektion 8,
Kat. H, Zone 2, Kurve B&R)

EMC Immunität

IEC 61000-4-3 und
IEC 61000-4-8

Druckfestigkeit

450 kg

Ereignis-Dokumentation

Interner Speicher

Kritische EKG-Segmente und
Rettungsparameter werden für
bis zu 60 Minuten aufgezeichnet
und können auf eine Datenkarte
geladen werden

Externer Speicher

(optional) Bis zu 30 Stunden
EKG-Ereignisse oder bis zu
3 Stunden Audio- & EKG-
Ereignisse mit externer
Datenkartenoption.

PC-Basierte

Ereignisbetrachtung

EKG mit Ereignisanzeige und
Tonwiedergabe, wenn verfügbar

USB-Anschluss

Ereignis-Download und
Wartungsmassnahmen

Defibrillations- bzw. Analyseelektroden

Modell

Erwachsener DDP-2001
Kind DDP-200-2002

Oberfläche

77 cm² (jeweils)
50 cm² (jeweils)

Typ

Vorangeschlossen
Einweg-Nutzung
Selbstklebend mit Kabel
und Stecker

Platzierung

Erwachsener - Vorne/Seite
Kind - Vorne/Hinten

Kabellänge

122 cm

* Technische Änderungen ohne Mitteilung vorbehalten

Lifeline **VIEW** – Der Defibrillator,



Allzeit bereit: Leben retten

Wenn es zum plötzlichen Herztod kommt, müssen Sie die Sicherheit haben, dass Ihr AED einsatzbereit ist. Deshalb führt Ihr Lifeline VIEW täglich umfassende Selbsttests durch. Eine blinkende Leuchtanzeige signalisiert Ihnen, dass alles in Ordnung ist. Im Gegensatz dazu weisen viele andere Defibrillatoren nur darauf hin, dass ein Problem vorliegt. Mit dem Lifeline VIEW prüfen Sie das Gerät per Knopfdruck auf Einsatzbereitschaft und sind sofort über die Zustände des Geräts, der Batterie und der Elektroden informiert - ohne das Gerät wirklich einzuschalten.



Mit Erste-Hilfe-Display

Der Notfall ist eingetreten: Herz-Kreislauf-Zusammenbruch, der plötzliche Herztod droht. Jetzt müssen Sie schnell, angemessen und selbstsicher handeln, um den Patienten zu reanimieren. Der Lifeline VIEW unterstützt Sie dabei: mit einem integrierten Video-Bildschirm, der Ersthelfer und Laien Schritt für Schritt durch die Erste-Hilfe-Massnahmen führt.

Das revolutionäre, lebensrettende Gerät zeichnet sich durch funktionales, benutzerfreundliches Design aus und erfüllt höchste, nach militärischen Normen gestalteten Ansprüche inkl. der bewährten biphasischen Impulskurve.

Allenspach Medical AG - Dornacherstrasse 5 - 4710 Balsthal - T: 062 386 60 60 - F: 062 386 60 69 - www.allenspachmedical.ch

defibtech

WWW.DEFIBTECH.CH

Allenspach Medical AG

Tel. 062 386 60 60 • info@allenspachmedical.ch • Fax 062 386 60 69

www.allenspachmedical.ch

CE
0197



der zeigt wie es geht.



Sehen und hören, was hilft

Der Lifeline VIEW zeigt Ihnen mit farbigen, professionellen, interaktiven Videos mit klaren Sprachanweisungen, wie die Reanimation durchzuführen ist. Durch das Video erhalten Sie selbst dann volle Unterstützung, wenn Sie in lauter Umgebung arbeiten müssen und Ansagen kaum zu verstehen wären.



Ihr persönlicher AED-Trainer

Mit dem Lifeline VIEW haben Sie beim Einsatz Ihren persönlichen Trainer zur Seite. Das Display führt Sie audio-visuell gestützt durch die gesamte Reanimation: von der Vorbereitung des Patienten über die Befestigung der Elektroden bis zur Schockabgabe und den einzelnen Schritten der Herz-Lungen-Wiederbelebung, wahlweise mit oder ohne Beatmung.



Wartung leicht gemacht

Der Lifeline VIEW vereinfacht revolutionär die Wartung. Auf Abruf führt er einfache Selbsttests durch. Klare Videoanweisungen unterstützen Sie beim Überprüfen und Austauschen der Elektroden, des Batteriepacks und der Datenkarte. Per USB oder SD-Karte spielen Sie Upgrades auf und lesen Einsatzdaten aus.

Registrieren Sie sich noch heute mit Ihrem Gerät in unserer AED Verwaltungsdatenbank auf www.defibtech.ch und profitieren Sie als Kunde von vielen Dienstleistungen und Infos rund um Ihr AED-Gerät.



Lifeline VIEW - Technische Spezifikationen*

Defibrillator

Typ
Halbautomatisierter externer Defibrillator

Modell
DDU-2300 Serie

Impulsform
Biphasisch, exponentiell (Impedanzangepasst)

Bedienelemente
Beleuchteter Ein-/Ausschalter
Beleuchtete Schocktaste

Energie
Erwachsener: 150 Joules
Kinder: 50 Joules
(bei 50 Ohm Patientenimpedanz)

Ladedauer (*neu bei 25 °C*)
Kleiner 4 Sekunden

Bildschirm
Hochauflösender LCD Farbbildschirm

Video Animation
Video mit bewegten Bildern
Textanweisungen

HLW-Unterstützung
Visuell und akustisch
Bei Bedarf Video-Hilfe

Sprachansagen
Umfangreiche Sprachansagen
führen den Anwender durch den Betrieb des Gerätes

Rescue-Protokoll
ERC 2010
Unterstützt Protokoll-Updates
durch den Anwender
(passwortgeschützt)

Patienten-Analyse-System

Patienten-Analyse
Automatische Bewertung der Patientenimpedanz für richtigen Elektrodenkontakt.
Überwacht Signalqualität und analysiert EKG bzgl. schockbarem Rhythmus

Sensitivität/Spezifität
Übertrifft Vorgaben AAMI-DF-39 und AHA Empfehlungen

Batteriepack

Modell DBP-2003

Energie
12V, 2800 mAh

Kapazität (*Neu bei 25 °C*)
125 Schocks oder 8 Stunden Dauerbetrieb

Standby-Zeit
4 Jahre (typisch)

Typ
Lithium-Mangandioxid
Recyclebar
nicht wiederaufladbar

Anzeige niedrige Batterieenergie
Visuell, akustisch

Status-Bildschirm
Geräte Selbsttestergebnisse
Elektroden und Batterie (Status und Ablaufdatum)

Selbstüberwachung

Automatisch
Tägliche, wöchentliche und monatliche Selbsttests (STK-befreit)

Batterieeinlage
System-Integritätstest nach Batterieeinlage

Elektroden
Täglicher Test zu angeschl. Elektroden

Manuell
Batterie- und Gerätetest kann durch den Anwender nach Bedarf ausgelöst werden

Status-Anzeige
Visuelle und akustische Anzeige des Gerätestatus

Status-Bildschirm
Geräte Selbsttestergebnisse
Elektroden und Batterie (Status und Ablaufdatum)

Umgebungsbedingungen

Temperatur
Betrieb und Standby
0 bis 50 °C

Relative Feuchte
5-95% (nicht kondensierend)

Höhe
-150 bis 4500 m per MIL-STD-810F 500.4 Prozedur 2

Vibration
Am Boden per MIL-STD-810F 514.5 Kategorie 20

Helikopter
(RTCA/DO-160D, Sektion 8.8.2, Kat.R, Zone 2, Kurve G)

Flugzeug
(RTCA/DO-160D, Sektion 8, Kat.H, Zone 2, Kurve B&R)

Stossfestigkeit
per MIL-STD-810F 516.5 Prozedur 4 (1,2 Meter Fall, jede Ecke, Seite, Fläche im Standby-Modus)

Schutzklasse
IEC60529 Klasse IP55
Schwallwasser- und Staubschutz

ESD
EN61000-4-2:1998 (offen bis zu 8kV, Direktkontakt bis zu 6 kV)

EMC Emmission
CISPR 11 Gruppe 1 Level B und FCC Teil 15

EMC Immunität
IEC 61000-4-3 und IEC 61000-4-8

Druckfestigkeit
450 kg

Ereignis-Dokumentation

Interner Speicher
Kritische EKG-Segmente und Rettungsparameter werden für bis zu 60 Minuten aufgezeichnet und können auf Datenkarte gespeichert werden

PC-Basierte Ereignisbetrachtung
EKG mit Ereignisanzeige und Tonwiedergabe, wenn verfügbar

Externer Speicher
(optional) Bis zu 30 Stunden EKG-Ereignisse oder bis zu 3 Stunden Audio- & EKG-Ereignisse mit externer Datenkartenoption.

USB-Anschluss
Ereignis-Download und Wartungsmassnahmen

Abmessungen

Grösse
18,5 x 24 x 5,8 cm

Gewicht
1,4 kg (inkl. Batterie)

Defibrillations- bzw. Analyseelektroden

Modell
Erwachsener DDP-2001
Kind DDP-2002

Typ
Vorangeschlossen
Einweg-Nutzung
Selbstklebend mit Kabel und Stecker

Oberfläche
77 cm² (jeweils)
50 cm² (jeweils)

Platzierung
Erwachsener - Vorne/Seite
Kind - Vorne/Hinten

Kabellänge
122 cm

* Technische Änderungen ohne Mitteilung vorbehalten

Defibtech Lifeline PRO AED

Das Defibrillator Kombigerät für professionelle Anwender vereint 4 Geräte in einem: Manuelle Auslösung mit EKG Bildschirm, Automatisierte Auslösung mit EKG Bildschirm, Ersthelfer AED Videomodus, sowie Patientenüberwachung mit einem 3-Kanal EKG Adapter. Während des Betriebs kann zwischen den Betriebsweisen einfach umgeschaltet werden. Alles auf der Basis der bekannten, kompakten und robusten Lifeline VIEW Baureihe.

Warum Defibtech?

- Einfach im Gebrauch dank farbigem interaktiven Display
- Robustes und ergonomisches Smart Design
- Langlebig und wartungsarm
- Effektiv dank biphasischer Impulsform

70.05.062	Lifeline PRO (DE, FR, IT, ENG)	3400.00
70.05.063	Lifeline PRO EKG-Kabel	320.00



Defibtech Lifeline VIEW AED

Lernen Sie den Lifeline VIEW kennen. Sicherheit und Effizienz auf einem neuen Niveau. Das revolutionäre, lebensrettende Gerät zeichnet sich durch funktionales, benutzerfreundliches Design aus und erfüllt höchste, nach militärischen Normen gestaltete Ansprüche. Ein AED wie Sie ihn noch nie gesehen haben.

70.05.050	Lifeline VIEW (DE, FR, IT, ENG)	2900.00
70.05.056	Lifeline PRO / VIEW Tragtasche schwarz	150.00
70.05.058	Lifeline PRO / VIEW Datenkarte	150.00
70.05.059_A	Lifeline PRO / VIEW Elektroden für Erwachsene	100.00
70.05.059_P	Lifeline PRO / VIEW Elektroden für Kinder	190.00
70.05.054	Lifeline PRO / VIEW 4-Jahres Batteriepack	320.00
70.05.024	Wandhalterung zu AED, Auto, Trainer, VIEW, PRO	90.00



Defibtech Lifeline AED

Auf Grund des patentierten Smart Designs und klassenführender technischer Daten gehört der Lifeline Defibrillator zu den weltweit am häufigsten gekauften Defibrillatoren. In seine Entwicklung flossen die Erfahrungen aus bewährten medizinischen Geräten, viele Design-Ideen und technische Innovationen ein.

Das Ergebnis:
Der Lifeline AED ist auf dem neuesten Stand von Wissenschaft und Technik.

70.05.022	Lifeline AED (DE, FR, IT, ENG)	2500.00
70.05.029	Lifeline AED Tragtasche schwarz	150.00
70.05.041	Lifeline AED Koffer gelb gross	350.00
70.05.042	Lifeline AED Koffer schwarz klein	270.00
70.05.039_6	Lifeline AED Datenkarte 6 H EKG-Aufzeichnung	120.00
70.05.030	Lifeline AED Elektroden für Erwachsene	65.00
70.05.031	Lifeline AED Elektroden für Kinder	180.00
70.05.049	Lifeline AED 7-Jahres Batteriepack inkl. 9V Batterie	360.00
70.05.053	Lifeline AED 5-Jahres Batteriepack inkl. 9V Batterie	270.00
70.05.024	Wandhalterung zu AED Lifeline, Auto, Trainer, VIEW	90.00




Defibtech Lifeline Trainer

Das Standalone-Trainer-Paket enthält ein Schulungsgerät (Achtung: kann nicht zur Abgabe von Defibrillationsschocks genutzt werden!), Trainingselektroden, wiederaufladbare Trainingsbatterie, Batterieladegerät und eine Fernbedienung zur einfacheren Handhabung. Das Schulungsgerät ist vorprogrammiert zur Simulation von 6 verschiedenen Szenarien. Um das Trainingsgerät eindeutig zu unterscheiden, sind alle gummierte Aussenflächen rot anstatt schwarz.

70.05.023	Lifeline Trainer (DE, FR, IT, ENG)	690.00
70.05.043	Lifeline AED-Trainingspaket	470.00
70.05.026	Lifeline Trainer Tragtasche rot	150.00
70.05.027	Lifeline Trainer Elektroden für Erwachsene Pack	50.00
70.05.028	Lifeline Trainer Elektroden für Erw. Pads 5 Paar	50.00
70.05.044	Lifeline Trainer Elektroden für Kinder Pack	50.00
70.05.048	Lifeline Trainer Elektroden für Kinder Pads 5 Paar	50.00
70.05.045	Lifeline Trainer Akku (ohne Ladegerät)	270.00
70.05.046	Lifeline Trainer Ladegerät zu Trainer Akku	65.00
70.05.047	Lifeline Trainer Fernbedienung inkl. Batterie	85.00
70.05.060	Lifeline Training Software-Karte	110.00
70.05.024	Wandhalterung zu AED Lifeline, Auto, Trainer, VIEW	90.00



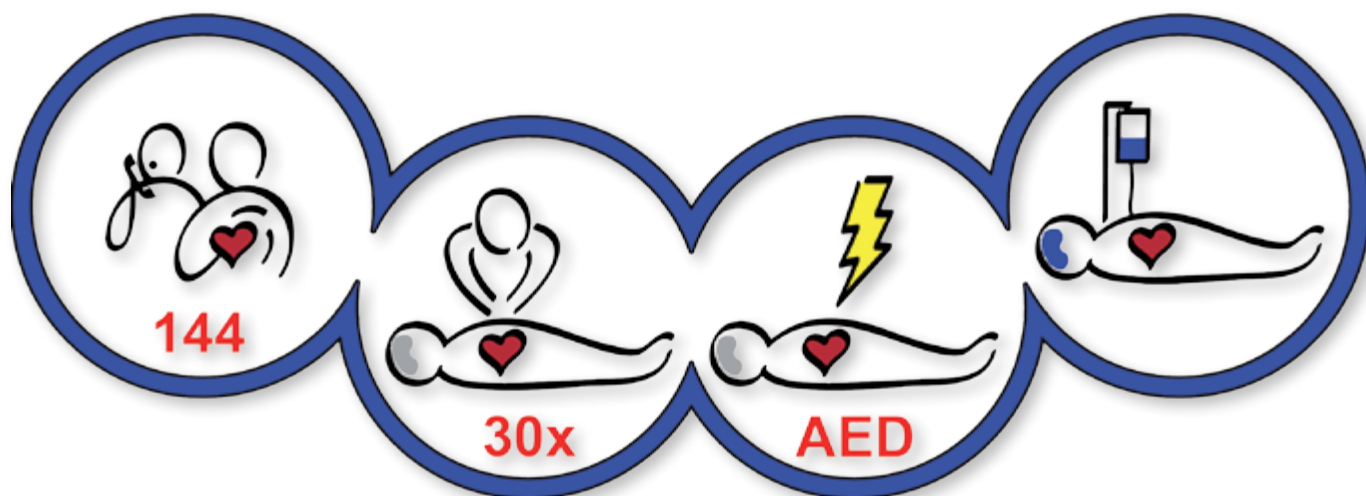

defibtech

Weitere Informationen auf www.defibtech.ch



ALLENSPACH MEDICAL AG

a health care company

Postfach 564
4710 Balsthal SO

Telefon 062 386 60 60
Telefax 062 386 60 69

... we keep you moving!

Bestellkarte

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Anzahl

Firma

Kontaktperson

Abteilung

Kunden-Nr.

Adresse

Direktwahl

PLZ / Ort

E-Mail

Bemerkungen

Datum

Unterschrift

* Gültig nur für Defibrillatoren und Zubehör



A

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale risposta
Envoi commercial-réponse



HERBSTAKTION

**10 % Rabatt auf IHRE
BESTELLUNG ***

Bis 28.02.2014

Allenspach Medical AG
Postfach 564
4710 Balsthal